


Zeckenzange

**zur mühelosen
Entfernung von Zecken,
enthält keine Gifte und
Insektizide**

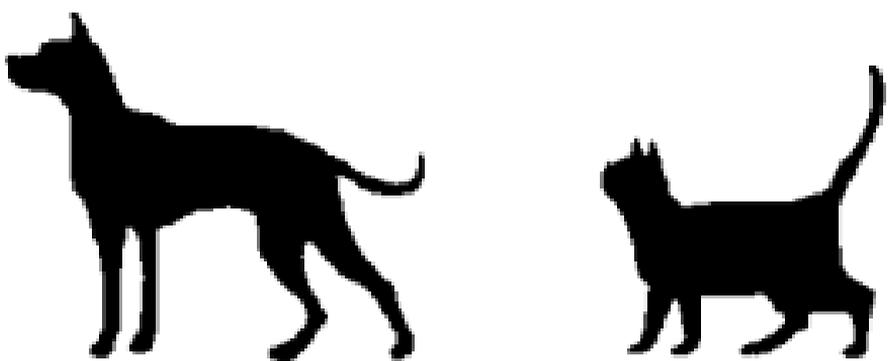

Gebrauchsanweisung:

Drücken Sie die Feder an der Zeckenzange, um sie zu öffnen. Streichen Sie das Fell um die Zecke beiseite, legen Sie die Greifer um die Zecke und schließen Sie die Greifer vorsichtig um den Zeckenkopf herum. Durch gleichmäßiges Drehen mit oder gegen den Uhrzeigersinn (2-3 Umdrehungen) lässt sich die Zecke leicht entfernen. Die Hautpartie sollte nach der Entfernung gründlich desinfiziert werden.

Falls sich die Zecke nicht komplett entfernen lässt, suchen Sie bitte einen Tierarzt auf.