


Ein Handgriff genügt

So wird der Nasanita Nasenschmetterling® eingesetzt



Bei der ersten Anwendung sollte der Nasanita Nasenschmetterling® zunächst in seiner Form belassen und unverändert in die Nase eingesetzt werden. Am besten zeigt Ihnen Ihr Arzt, wie es geht: Halten Sie den Nasenschmetterling mit dem u-förmigen Titanbügel von sich weg. Klappen Sie die Silikonflügel jeweils mit Daumen und Zeigefinger nach unten und führen Sie sie dann wie abgebildet in die beiden Nasenlöcher hinein. Die Silikonflügel legen sich nun von innen an die Nasenflügel. Schieben Sie jetzt die Mitte der Silikonflügel in der Nase so weit wie möglich zur Nasenspitze.

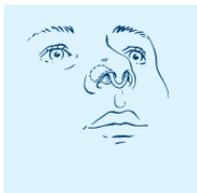

So sitzt Ihr Nasanita Nasenschmetterling® richtig

Der Nasenschmetterling® sitzt richtig in der Nase, wenn die offene Seite des u-förmigen Titanbügels Richtung Nasenspitze zeigt, der Bügel am Nasensteg flach anliegt und die Ränder der beiden Silikonflügel passgenau mit dem Nasenrand abschließen.

Der Nasenschmetterling® sitzt falsch,

wenn der u-förmige Titanbügel nicht am Nasensteg flach anliegt, die Silikonflügel über die Nasenflügel hinaus stehen oder im Inneren der Nase über die Nasenklappe geschoben werden. Dann kann der Nasenschmetterling® keine Nasenatmungsverbesserung herbeiführen.

Das sollten Sie beachten

Bitte achten Sie darauf, dass jedes Familienmitglied aus hygienischen Gründen seinen eigenen Nasanita Nasenschmetterling® benutzt. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn kleinere Kinder könnten es versehentlich verschlucken.



Zu Ihrer Sicherheit

Der Nasanita Nasenschmetterling® sollte nicht in einer wunden Nase oder bei starker wässriger Nasensekretion angewendet werden.

Verwenden Sie möglichst keine anderen Mittel (z. B. Nasenspray oder Nasensalbe) gleichzeitig mit dem Nasanita Nasenschmetterling® in der Nase, denn dadurch könnte die Haltbarkeit und Sitzfestigkeit Ihres Nasenschmetterlings® beeinträchtigt werden.

Wichtig: Sollten Sie den Nasanita Nasenschmetterling® im Rahmen einer nächtlichen nicht invasiven Beatmungstherapie einsetzen, dürfen keine sogenannten Full-Face-Masken angewendet werden, sondern ausschließlich Nasenmasken!

So pflegen Sie Ihren Nasanita Nasenschmetterling®

Vor und nach jeder Benutzung sollte der Nasanita Nasenschmetterling® mit warmem, fließendem Wasser gründlich gereinigt werden. Anhaftende Sekretspuren müssen mechanisch mit einer Bürste oder durch Reiben o. ä. entfernt werden.

Wichtig: Das vorsichtige Abtupfen mit einem fusselfreien Tuch nicht vergessen!

Ein Sterilisieren oder Desinfizieren ist normalerweise nicht erforderlich. Sollten Sie den Nasanita Nasenschmetterling® trotzdem sterilisieren oder desinfizieren wollen, verwenden Sie bitte Standardhitzeverfahren (z.B. Auskochen, Autoklavieren) oder Desinfektionsmittel, die üblicherweise auf der Haut und auf Schleimhäuten angewendet werden dürfen.

Bei Nichtbenutzung sollten Sie den Nasanita Nasenschmetterling® hygienisch und sicher in der praktischen Nasanita® Box aufbewahren. Lassen Sie die Box so lange geöffnet, bis Ihr Nasenschmetterling® vollständig getrocknet ist.

