


# Visco-Vision® Gel

10 g

## Benetzendes hochviskoses Augengel – wohltuend & lang anhaltend

 Diese Gebrauchsinformation enthält wichtige Produktinformationen. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch und heben Sie sie auf. Vielleicht möchten Sie sie später noch einmal lesen.

**Visco-Vision® Gel enthält:** 2,0 mg/g Carbomer 980, Sorbit, Natriumhydroxid, Dinatriumedetat, Cetrimid und destilliertes Wasser.

**Beschreibung:** Visco-Vision® Gel ist eine viskose, hypotone Benetzungslösung mit 0,2 % Carbomer 980. Visco-Vision® Gel weist hervorragende mukoadhäsive Eigenschaften auf, d. h. Visco-Vision® Gel befeuchtet das Auge lang anhaltend, indem es die Hornhaut- und Bindehautoberfläche gleichmäßig benetzt.

**Anwendungsgebiete:** Benetzungsmittel zur Erleichterung bei Trockenheitsgefühl, Fremdkörpergefühl und visuellem Stress bei umweltbedingt trockenem Auge.

Mit Visco-Vision® Gel kann eine lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden erzielt werden, die z. B. durch:

- mechanische Beanspruchung, z. B. nach diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch klimatisierte Räume, Wind, Kälte, trockene oder schadstoffhaltige Luft, beispielsweise durch Zigarettenrauch,
- Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen, z.B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten verursacht werden.

### Warnhinweis:

- Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe darf Visco-Vision® Gel nicht angewendet werden.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.

### Nebenwirkungen:

Die folgenden Nebenwirkungen wurden gelegentlich beobachtet:

- Vorübergehendes leichtes Brennen
- Klebrigkeit der Augenlider
- Verschwommensehen nach dem Einbringen des Gels

### Dosierung:

Bringen Sie 3–4 mal täglich oder nach Bedarf einen Tropfen des Gels in das/die betroffene(n) Auge(n) ein. Die Häufigkeit der Anwendung hängt von den Beschwerden und der erzielten Linderung ab.

### Art der Anwendung:

Wenden Sie Visco-Vision® Gel wie in den Abbildungen 1–3 gezeigt an.

Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie Visco-Vision® Gel anwenden.

Entfernen Sie vor dem ersten Öffnen den Sicherheitsring.

Entfernen Sie vor dem ersten Öffnen den Sicherheitsring. Nehmen Sie den Verschluss von der Tube.




Legen Sie den Kopf in den Nacken (1), und ziehen Sie das untere Augenlid so nach unten, dass es eine kleine Tasche bildet.

Halten Sie die Tube senkrecht, mit der Öffnung nach unten, und drücken Sie leicht auf die Tube, bis sich an der Tubenspitze ein kleiner Tropfen bildet.

Bringen Sie diesen Tropfen in Ihr Auge ein, ohne das Auge mit der Tubenspitze zu berühren (2).

Blinzeln Sie zwei oder drei Mal, um das Gel gleichmäßig über das Auge zu verteilen, und wischen Sie gegebenenfalls überschüssiges Gel in der Umgebung der Augenlider ab (3).

Verschließen Sie die Tube. Achten Sie dabei sorgfältig darauf, dass Sie mit der Tubenspitze nichts berühren (auch nicht Ihre Finger).

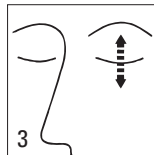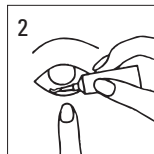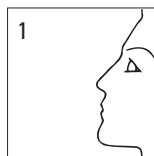

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

- Nicht verwenden, wenn die Tube oder die Sicherheitsversiegelung beschädigt ist.
- Bei der Anwendung des Gels sollten keine Kontaktlinsen getragen werden. Warten Sie nach der Anwendung mindestens 30 Minuten, bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Sollen andere Arzneimittel gleichzeitig lokal am Auge angewendet werden (z. B. zur Glaukomtherapie), sollte ein Abstand von mindestens 5 Minuten zwischen den beiden Anwendungen eingehalten werden. Visco-Vision® Gel sollte stets zuletzt angewendet werden.
- Bitte berühren Sie weder das Auge noch eine andere Fläche mit der Tubenspitze, um eine Verletzung des Auges und/oder eine bakterielle Verunreinigung des Gels zu vermeiden.
- Verschließen Sie die Tube nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe.
- Wenn die Augenbeschwerden während der Anwendung von Visco-Vision® Gel andauern oder nach dem Absetzen des Gels erneut auftreten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

**Lagerung:**

- Bei 2 °C – 25 °C lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Haltbarkeit:**

Das Verfallsdatum ist auf der Tube bzw. auf der Faltschachtel aufgedruckt.

Visco-Vision® Gel darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Nach dem ersten Öffnen der Tube das Präparat nicht länger als vier Wochen anwenden.

**Stand der Gebrauchsinformation:**

Dezember 2016

**Hersteller:**

OmniVision GmbH  
Lindberghstraße 9  
82178 Puchheim, Deutschland  
Tel.: +49 89 84 07 92 30  
Fax: +49 89 84 07 92 40  
www.omnivision.de  
E-Mail: info@omnivision.de

**Vertrieb Österreich:**

OmniVision GmbH  
Anton Anderer Platz 6  
1210 Wien, Österreich  
Tel.: +43 1 270 70 70  
Fax: +43 1 270 70 70 20  
www.omnivision.at  
E-Mail: info@omnivision.at

STERILE A

CE 0123



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Deutschland  
E-Mail: info@omnivision.de

12/2016