

Gebrauchsanweisung

**Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure
– ohne Konservierungsmittel
für eine natürliche Befeuchtung: wohltuend,
gut verträglich und lang anhaltend.**



**Hylo-Vision®
SafeDrop® 0,1 %**

(Natriumhyaluronat 0,10 %)


**Benetzende Augentropfen, steril und phosphatfrei,
zur Befeuchtung der Augenoberfläche und für harte
und weiche Kontaktlinsen geeignet.**

Beschreibung: Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % ist ein steriles konservierungsmittelfreies Benetzungsmittel in der innovativen SafeDrop®-Flasche, einem von OmniVision mitentwickelten konservierungsmittelfreien Mehrdosenbehältnis. Es dient der verbesserten Befeuchtung der Augenoberfläche und ist zur Benetzung von Kontaktlinsen jeder Art geeignet. Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % enthält Hyaluronsäure, eine natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschlichen Auges und im Tränenfilm vorhanden ist. Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % ist dadurch besonders gut verträglich. Es schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es eine lang anhaltende Linderung der Symptome Trockenheit, Reizungen und leichte Irritationen, insbesondere

- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch oder
- bei Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten oder


- bei mechanischer Beanspruchung, z. B. durch das Tragen von harten oder weichen Kontaktlinsen oder durch diagnostische Eingriffe am Auge.

Anwendung:

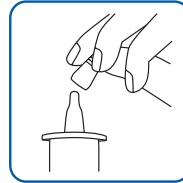

Schritt 1:


Vor jeder Anwendung die Schutzkappe abnehmen.

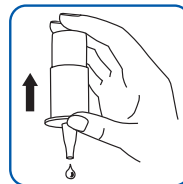

Schritt 2:


Bitte vor der ersten Anwendung der SafeDrop®-Flasche mehrere Druckbewegungen ausführen, bis der erste Tropfen produziert wird. Halten Sie dabei gemäß Abbildung die

Flasche kopfüber. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Tropferspitze mit den Fingern und dem Auge.

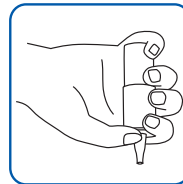

Schritt 3:

Halten Sie die Flasche, wie im Bild dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Daumen auf der breiten, abrutschsicheren, runden Fingerauflage ruht.

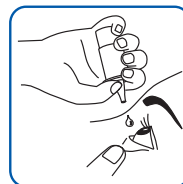

Schritt 4:

Bringen Sie den Kopf in eine Nackenposition, ziehen Sie das untere Augenlid mit der freien Hand herunter. Träufeln Sie bei Bedarf einen bis zwei Tropfen Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % in den geöffneten Bindehautsack ein, indem Sie ein bis zwei mal den Pumpmechanismus betätigen. Achten Sie darauf, dass dabei die Flasche senkrecht gehalten wird. Schließen Sie langsam die Augen, so dass

sich die Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % Lösung gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilen kann.

Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie einen oder zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie sie in Ihre Augen setzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben.

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

Zusammensetzung: Natriumhyaluronat (0,10%), Sorbitol, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Citronensäure, gereinigtes Wasser.

Packungsgröße: Verkaufseinheit: SafeDrop® Mehrdosenbehältnis mit 10 ml und 2 x 10 ml (Muster mit 5 ml)

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Nicht verwenden bei beschädigtem SafeDrop® Mehrdosenbehältnis.
- Das Auge mit der Tropferspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen.
- Nicht anwenden bei einem Verdacht auf eine Augeninfektion oder bei einer bestehenden Augeninfektion.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses wird auf jeder SafeDrop®-Flasche sowie auf dem Umkarton angegeben.
- Wenn Ihre Beschwerden während der Anwendung von Hylo-Vision® SafeDrop® 0,1 % anhalten, suchen Sie bitte Ihren Augenarzt auf.

Lagerung: Vor Frost schützen.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum sind auf der SafeDrop®-Flasche sowie auf dem Umkarton angegeben. Nach Anbruch sechs Monate verwendbar.

Stand der Gebrauchsanweisung: Oktober 2016

CE₀₁₂₃

OmniVision GmbH

■ Lindberghstraße 9

82178 Puchheim

Deutschland

Tel.: +49 (0)89 / 84 07 92-30

Fax: +49 (0)89 / 84 07 92-40

www.omnivision.de

info@omnivision.de

Vertrieb Österreich

OmniVision GmbH

Anton Anderer Platz 6

1210 Wien

Österreich

Tel.: +43 1 270 70 70

Fax: +43 1 270 70 70-20



Verwendbar bis (JJJJ-MM)

LOT

Chargencode

STERILE A

Sterilisationsverfahren, aseptisch

25°C

Nicht über 25 °C lagern.



Bitte Gebrauchsinformation beachten.

