

Geratherm®


chlamydia check

Chlamydien Schnelltest

Schnell und einfach Sicherheit verschaffen.



- Zum Nachweis des Bakteriums Chlamydia trachomatis
- Schnelles Ergebnis nach ca. 15 Minuten
- Testergebnis einfach ablesbar
- Hohe diagnostische Spezifität von 98,3 %
- Test mit vaginalem Abstrich durchführbar
- Zur Eigenanwendung

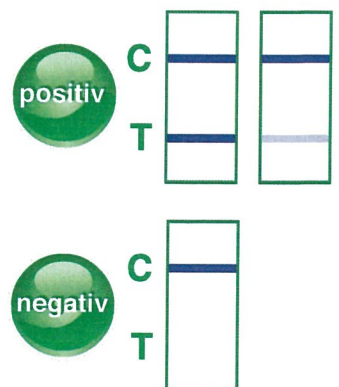

Testinhalt: 1 Testkassette, 1 Abstrichtupfer, 1 Pufferflasche und Gebrauchsanweisung

Was sind Chlamydien?

Chlamydia trachomatis ist ein Bakterium, das sich als Parasit in den Zellen von Schleimhäuten im Augen-, Atemwegs- oder Genitalbereich einnistet. Infektionen mit Chlamydia trachomatis gehören zu den weltweit meist verbreiteten Geschlechtskrankheiten.

Welche Symptome haben Chlamydien Infektionen?

Chlamydia trachomatis-Infektionen verursachen häufig keine Symptome.

- Jucken, Ungewöhnlicher Scheidenausfluss
- Brennen beim Wasserlassen
- Schmerzen und/oder Blutung bei oder nach dem Geschlechtsverkehr
- Ziehen im Unterbauch
- Zwischenblutungen, irreguläre Monatsblutungen

Was ist die Ursache für Chlamydien?

Chlamydien sind Bakterien, die vor allem durch sexuellen Kontakt übertragen werden. Besonders gefährdet sind Frauen mit wechselnden Sexualpartnern.

Wie wird der Test durchgeführt?

Dieser Test ist ausschließlich zur Anwendung durch Frauen geeignet. Es muss ein Abstrich vom Gebärmutterhals vorgenommen werden. In Verbindung mit einer Pufferflüssigkeit kann nach 15 Minuten ein Testergebnis auf der Testkassette abgelesen werden.

Was sagt das Ergebnis?



POSITIV wird die Probe gewertet, wenn im Kontrollfenster (C) und Testfenster (T) violette Farblinien auftreten, auch wenn die Farblinie bei „T“ sehr schwach ist.



NEGATIV wird die Probe gewertet, wenn nur eine violette Farblinie bei „C“ auftritt.

Was sind die Folgen einer Infektion?

Unbehandelte Infektionen führen häufig zu Unfruchtbarkeit und erhöhen das Risiko von Eileiter- oder Bauchhöhlenschwangerschaften sowie Frühgeburten. Infizierte Mütter können die Infektion an das Neugeborene weitergeben. Häufige Komplikationen bei Neugeborenen sind Bindehaut- und Lungenentzündung.

Wie präzise ist der Test?

Der Geratherm® Schnelltest erzielte eine diagnostische Spezifität von bis zu 98,3 %.

Warum ist der Test wichtig?

Leider ist die Krankheit kaum bekannt, obwohl sie schwerwiegende Folgen haben kann. Durch eine regelmäßige Durchführung des Tests und frühzeitiges Erkennen einer Infektion kann möglichen Folgeschäden vorgebeugt und die Krankheit vollständig geheilt werden.